

Willi Fox COVID-19 Ag Spuck-Schnelltest



Für Heime - Unternehmen - Schulen - Praxen - Apotheken

In nur 15 Minuten eine zuverlässige Antwort, ob eine SARS-CoV-2 Infektion vorliegt.

<p>1. Speichelauffangbehälter und Extraktionsröhrchen zusammenstecken</p> 	<p>2. Röhrchen zusammendrücken, Auswurf und Speichel in den Auffangbehälter spucken</p> 	<p>3. Puffer öffnen, gesamter Inhalt in das Extraktionsröhrchen geben</p> 
<p>4. Tropfkappe auf Röhrchen setzen und 10 Sek. zusammendrücken</p>  	<p>5. 2 Tropfen auf die Kassette geben</p> 	<p>6. Nach 15 Minuten ablesen</p> 

Ab sofort lieferbar!

Lange Haltbarkeit und einfache Lagerung!

Bitte wenden >>

Willi Fox - COVID-19 Ag Spuck-Schnelltest

Test	Probe- medium	Packungs- grösse	Artikel Nr.	Pharma- code	Ich bestelle (Anzahl Packungen)
COVID-19 Antigen Speichel und Spuck Schnelltest	Sputum, Spei- chel, Spucke	20	COVAS20	7798881	

Verwendbare Probemedien:

- Spucke/ Speichel/ Sputum

Zuverlässigkeit:

Relative Sensitivität: 90,1% (82,5%-95,1%)

Relative Spezifität: 99,3% (97,7%-99,9%)

Totale Übereinstimmung: 97,0% (94,9%-98,5%)

*95% Konfidenzintervall

Durchführbar von Ihrem medizinisch geschulten Personal

Bestellung bitte an: Fax: 061 535 14 80
Email: willifox@willifox.com
Telefon: 061 534 74 65

Heute bestellen (bis 14.00h) - Morgen erhalten!



zertifizierte, qualitativ hochwertige Schweizer Produkte



schnelle und unkomplizierte Bestellung



fundiertes Produktwissen und ausführliche Beratung