


Kurzanleitung – hCG Frühschwangerschaftstest

1. Drei Tropfen Urin in das Probefeld der waagrecht liegenden Testkassette geben

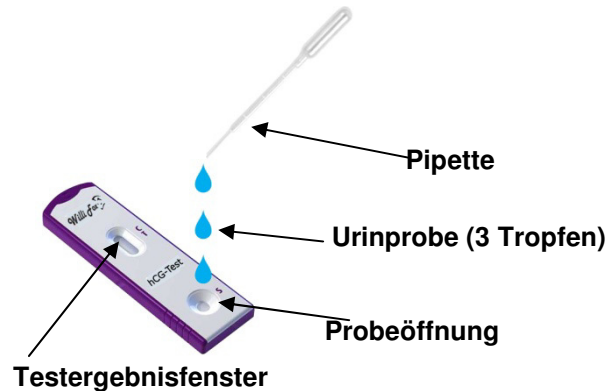


2. 3 - 5 Minuten warten



Achtung: Auf keinen Fall länger als 10 Minuten warten mit dem Ablesen!

3. Testergebnis ablesen

Schwanger (positiv):

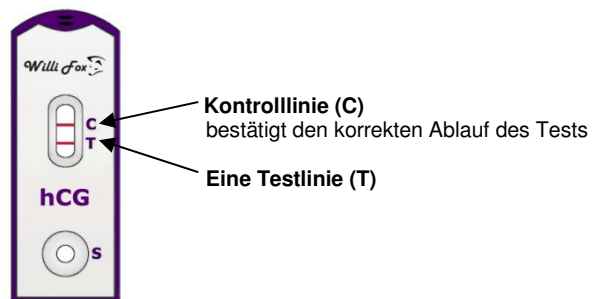

Zwei rote Linien erscheinen im Sichtfenster

Achtung: Die Farbintensität der Testlinie kann schwächer oder stärker sein als die der Kontrolllinie und zwischen rosa und rot variieren.

Nicht Schwanger (negativ):



Nur eine rote Linie erscheint in der Kontrollregion (C):

Achtung: Nur innerhalb der Auswertungszeit von 3 bis 5 Minuten Ergebnis ablesen!

Ungültiges Testergebnis:



Keine rote Linie erscheint in der Kontrollregion (C).

Der Test ist ungültig und sollte wiederholt werden!