


Guide rapide – hCG test précoce de grossesse

1. Donnez 3 gouttes d'urine sur le testeur d'échantillon de la cassette placée horizontalement


2. Attendez 3 à 5 minutes

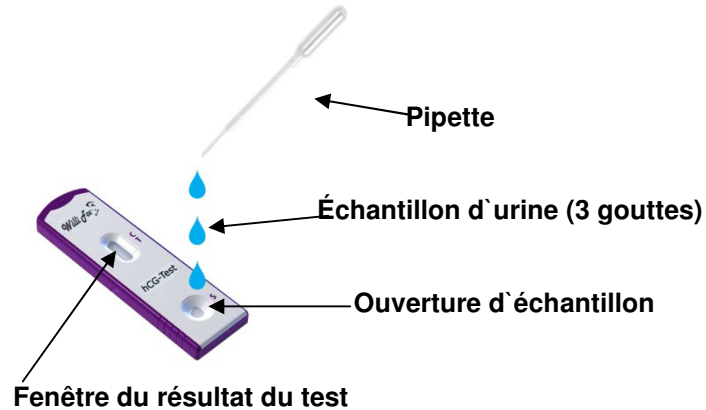

Attention: N'attendez jamais plus de 10 minutes!

3. Relevez le résultat du test

Test positif :

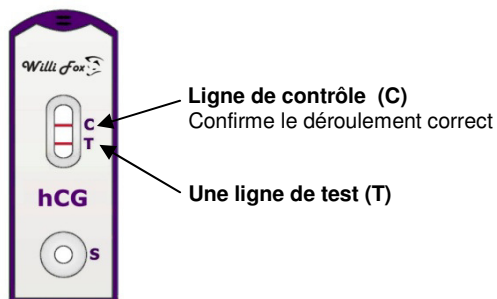

Doux lignes rouges apparaissent dans la fenêtre.

Attention: L'intensité de couleur de la ligne de test peut être plus faible ou plus forte que celle de la ligne de contrôle et peut varier entre rose et rouge !

Test négatif :



Uniquement une ligne rouge apparaît dans la région de contrôle (C):

Attention: N'attendez jamais plus de 10 minutes pour interpréter le résultat!

Résultat du test sans valeur:



Aucune ligne rouge n'apparaît dans la région de contrôle (C).

Le test n'est pas valable et doit être refait!