

Guide rapide – COVID-19 Test antigène

1. Prélèvement nasal



- Tenez délicatement l'écouvillon près de la cloison nasale de la narine tout en le poussant doucement dans le nasopharynx.
- Tournez l'écouvillon plusieurs fois.
- Laissez l'écouvillon ensuite quelques secondes de plus au même endroit sans le bouger, pour absorber le plus de sécrétions possibles.

2. Donnez 10 gouttes de liquide-tampon dans le tube d'extraction.



3. Trempez l'échantillon dans le liquide-tampon



- Introduisez l'écouvillon dans le tube d'extraction, puis pressez-le contre la paroi intérieure.

- Arrêtez de presser et laissez-le se gorgier à nouveau de liquide. Pressez-le à nouveau contre la paroi. Répétez l'opération plusieurs fois.
- **Laisser reposer la solution pendant 2 minutes**
- Retirez l'écouvillon, en le pressant fermement contre la paroi du tube pour libérer autant de liquide que possible.

4. Pipetez le liquide contenant l'échantillon sur la cassette.

- Placez un embout à pipeter sur le tube.
- **Pipetez 2 gouttes de liquide** dans l'ouverture de la cassette.




5. Attendez 15 minutes.



- N'attendez **pas plus de 15 minutes** pour lire le résultat!!

6. Interprétation du test

COVID-19 positif:

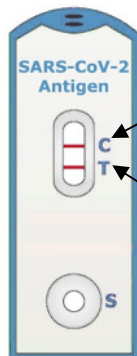


Ligne de contrôle (C)
confirme le déroulement correct du test

Ligne de test
SARS-CoV-2 (T)

Deux lignes de couleur (T+C) apparaissent dans la fenêtre de test.

Attention: L'intensité de la ligne de test peut être plus forte ou plus faible que la ligne de contrôle.


COVID-19 négatif:

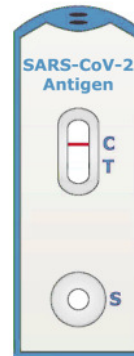

Une ligne de couleur (C) apparaît dans la fenêtre de test.

Attention: Lire le résultat à 15 minutes après l'exécution du test!

Résultat non valable:

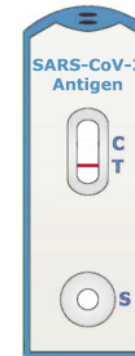

Aucune ligne de couleur n'apparaît dans la région de contrôle (C).

Le test n'est pas valable et doit être refait.