

Guide rapide – Test de norovirus(GI & GII)

Recueil et préparation de l'échantillon par le patient:


Pour des échantillons de selles solides:

1. Récoltez l'échantillon de selles



- On trouve le plus de norovirus dans les selles du patient **pendant les trois premiers jours** après le début des symptômes de la maladie.

2. Dévissez le tube et récolter l'échantillon

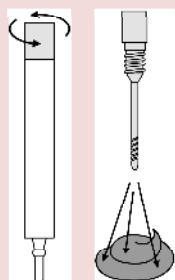

- Dévissez le tube et enfoncez le bâtonnet spiral env. 2 cm à **trois endroits différents**. Un volume d'un quart d'un petit pois (50 mg) est suffisant

3. Remettre le bâtonnet spiral dans le tube



Attention: Ne cassez pas le bout du bâtonnet!

4. Secouez le tube collecteur




- Mettez le tube dans le sachet et scellez le sachet.

Attention: Les échantillons **conservés à température ambiante** doivent être donnés et évalués par le médecin **dans 1 heure** après récolte de l'échantillon. Ils peuvent être conservés **trois jours au frigo**.

Pour des selles liquides :


1. Recueillir l'échantillon de selles liquides avec n'importe quel récipient propre et sec.

2. Dévisser le couvercle du tube collecteur en le tenant verticalement.

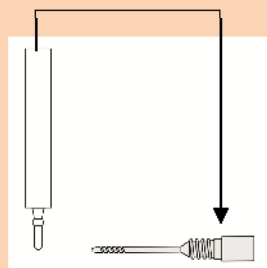

Attention: Faites attention à ne pas répandre de liquide du tube.

3. Pipettez deux gouttes (ca. 80-100 µl) d'échantillon dans le tube.

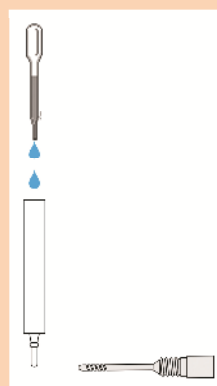

4. Refermer le tube en y introduisant le bâtonnet spiral.



Attention: Ne cassez pas le bout du bâtonnet !

5. Secouez le tube collecteur



- Mettez le tube dans le sachet et scellez le sachet.


Attention: Les échantillons **conservés à température ambiante** doivent être donnés et évalués par le médecin **max. 1 heure** après récolte de l'échantillon. Ils peuvent être conservés **trois jours au frigo**.

Guide rapide – Test de norovirus(GI & GII)

Au laboratoire:

1. Pipeter l'échantillon sur la cassette.

- Secouez bien le tube collecteur.
- Prenez un mouchoir en papier et brisez avec précaution le bout du tube à l'aide d'un mouvement circulaire.

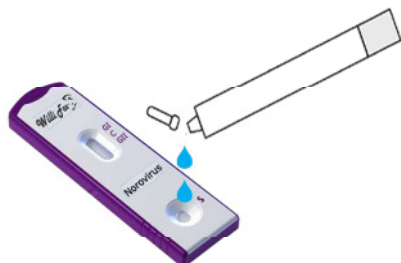

- Pipetez deux gouttes d'échantillon dans l'ouverture de la cassette de test.

2. Attendez 10 min. pour l'interprétation



- N'attendez pas plus de 20 minutes pour lire le résultat !

3. L'interprétation du résultat

Norovirus GI positif:



Ligne de test Norovirus (GI)

Ligne de contrôle verte (C)
(Confirme le déroulement correct du test)

Une ligne rouge (GI) et une ligne verte apparaissent dans la fenêtre de test.

Norovirus GII positif:



Ligne de test norovirus (GII)

Une ligne rouge (GII) et une ligne verte apparaissent dans la fenêtre de test.

Norovirus GI+GII positif:



Deux lignes rouges (GI+GII) et une ligne verte apparaissent dans la fenêtre de test.

Norovirus négatif:



Uniquement une ligne verte apparaît dans la zone de contrôle (C):

Attention: Lire le résultat entre 10 et 20 minutes d'attente !

Résultat non valable:



Aucune ligne verte n'apparaît dans la zone de contrôle (C).

Le test n'est pas valable et doit être refait.