

Kurzanleitung – RSV Test

1. Nasenabstrich machen



- Führen Sie den Abstrichtupfer vorsichtig in das Nasenloch ein, welches am meisten Sekret absondert, bis Sie den Widerstand der Nasenmuschel spüren (Nicht mehr als 2,5 cm).
- Drehen Sie den Tupfer ein paar Mal gegen die Nasenwand.

2. Geben Sie 10 Tropfen Puffer in das Extraktionsröhrchen



3. Probe in Flüssigkeit lösen



- Abstrichtupfer in das Extraktionsröhrchen schieben und gegen die innere Wand ausdrücken.
- Nochmals vollsaugen lassen und erneut ausdrücken. Mehrere Male wiederholen.

4. Probeflüssigkeit auf die Kassette geben.

- Kappe auf das Extraktionsröhrchen drücken.



- **3 Tropfen Extraktionslösung** in die Probeöffnung der Testkassette geben.


5. 15 Minuten warten



- **Nicht länger als 20 Minuten** mit Ergebnis ablesen warten!!

6. Testergebnis ablesen

RSV positiv:

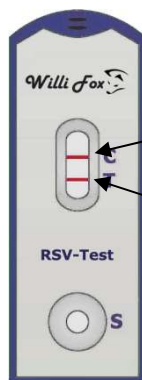

- **Kontrolllinie (C)** bestätigt korrekten Ablauf des Tests
- **Testlinie (T)**

Zwei rote Linien erscheinen im Sichtfenster

Achtung: Die Farbintensität der Testlinie kann schwächer oder stärker sein als die der Kontrolllinie und zwischen rosa und rot variieren.

RSV negativ:



Nur eine rote Linie erscheint in der Kontrollregion (C)

Achtung: Innerhalb der Auswertungszeit von 10 bis 20 Minuten ablesen!

Ungültiges Testergebnis:



Keine rote Linie erscheint in der Kontrollregion (C).

Der Test ist ungültig und sollte wiederholt werden!