

# Guide rapide – Test RSV

## 1. Prélèvement nasal



- Introduisez l'écouvillon délicatement dans la narine qui a le plus de sécrétion, jusqu'à sentir une résistance du cornet nasal (pas plus de 2,5cm).
- Tournez l'écouvillon quelque fois contre la paroi nasale.

## 2. Donnez 10 gouttes de liquide-tampon dans le tube d'extraction.



## 3. Trempez l'échantillon dans le liquide-tampon



- Introduisez l'écouvillon dans le tube d'extraction, puis pressez-le contre la paroi intérieure.
- Arrêtez de presser et laissez-le se gorgier à nouveau de liquide. Pressez-le à nouveau contre la paroi. Répétez l'opération plusieurs fois.

## 4. Pipetez le liquide contenant l'échantillon sur la cassette.

- Placez un embout à pipeter sur le tube.



- Pipetez 3 gouttes de liquide dans l'ouverture de la cassette.


## 5. Attendez 15 minutes.



- N'attendez pas plus de 20 minutes pour lire le résultat!!

## 6. Interprétation du test

### VRS positif:

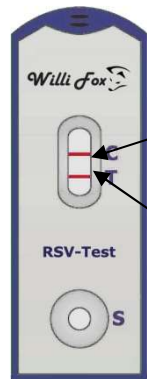

- Ligne de contrôle (C) confirme le déroulement correct du test
- Ligne de test RSV (T)

**Deux lignes rouges (T+C)** apparaissent dans la fenêtre de test.

Attention: L'intensité du rouge de la ligne de test peut être plus forte ou plus faible que la ligne de contrôle et peut varier entre le rose et le rouge.

### VRS négatif:



**Une ligne rouge (C)** apparaît dans la fenêtre de test.

### Résultat non valable:



**Aucune ligne rouge** n'apparaît dans la région de contrôle (C).

Le test n'est pas valable et doit être refait.