

Kurzanleitung – COVID-19 Antigen Test

1. Nasenabstrich machen



- Tupfer in der Nähe des Septums beim Nasenboden halten, während Sie den Tupfer sanft in den hinteren Nasenrachenraum (Nasopharynx) drücken.
- Drehen Sie den Tupfer mehrmals.
- Lassen Sie den Tupfer einige Sekunden an Ort und Stelle, um Sekrete aufzusaugen.

2. Geben Sie 10 Tropfen Puffer in das Extraktionsröhrchen



3. Probe in Flüssigkeit lösen



- Abstrichtupfer in das Extraktionsröhrchen schieben und gegen die innere Wand ausdrücken.

- Nochmals vollsaugen lassen und erneut ausdrücken. Mehrere Male wiederholen.
- **2 Minuten stehen lassen**
- Abstrichtupfer nochmals ausdrücken und rausnehmen

4. Probeflüssigkeit auf die Kassette geben.

- Kappe auf das Extraktionsröhrchen drücken.
- **2 Tropfen Extraktionslösung** in die Probeöffnung der Testkassette geben.




5. 15 Minuten warten



- **Nicht länger als 15 Minuten** mit Ergebnis ablesen warten!!

6. Testergebnis ablesen

COVID-19 positiv:

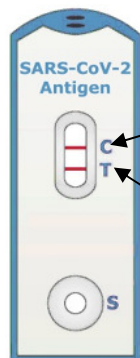


Kontrolllinie (C)
bestätigt korrekten
Ablauf des Tests

**Testlinie
SARS-CoV-2 (T)**

Zwei farbige Linien (T+C) erscheinen im Sichtfenster

Achtung: Die Farbintensität der Testlinie kann schwächer oder stärker sein als die der Kontrolllinie.

COVID-19 negativ:

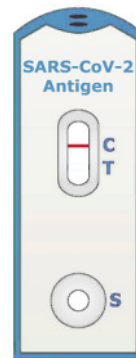

Eine farbige Linie (C) erscheint im Sichtfenster

Achtung: Innerhalb der Auswertungszeit von 15 Minuten ablesen!

Ungültiges Testergebnis:



Keine farbige Linie erscheint in der Kontrollregion (C).

Der Test ist ungültig und sollte wiederholt werden!