

# Guide rapide – COVID-19 test antigène salivaire

1. Assembler le réservoir à salive et le tube d'extraction




2. Pincer le tube d'extraction, récolter la salive dans le réservoir




Premier marquage

- Ne plus pincer le tube, pour que le liquide soit absorbé
- Répéter jusqu'à ce que la quantité souhaitée (0,5 ml) soit atteinte et que le **premier marquage** soit atteint

3. Ouvrir liquide-tampon (Puffer). Donner tout le liquide-tampon dans le tube d'extraction.

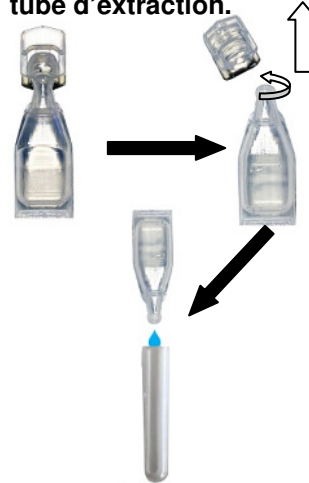

4. Mettre le capuchon sur le tube. Pincer le tube pendant 10 secondes

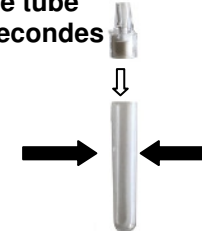

5. Donner deux gouttes dans l'ouverture de la cassette.




6. Lire le résultat après 15 minutes



- Ne pas attendre plus de 20 minutes pour lire le résultat!

## 7. Interprétation du résultat

Positif au COVID-19:

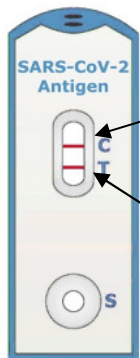


Ligne de contrôle (C) confirme le déroulement correct du test

Ligne de test SARS-CoV-2 (T)

Deux lignes colorées (T+C) apparaissent dans la fenêtre

Attention: L'intensité de la ligne de test peut être plus forte ou plus faible que la ligne de contrôle..


Négatif au COVID-19:

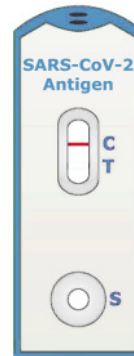

Une ligne colorée (C) apparaît dans la fenêtre

Attention: lire le résultat après 15, maximum 20 minutes!

Résultat non valable:

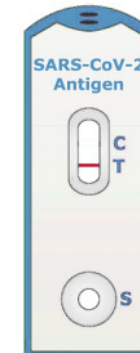

Aucune ligne colorée (C) n'apparaît dans la fenêtre.

Le test n'est pas valable et doit être refait!!

**Ce guide rapide ne remplace pas la lecture du mode d'emploi!**