


Guide rapide – FOB Test

Par le patient:

1. Récoltez l'échantillon de selles




2. Dévissez le tube

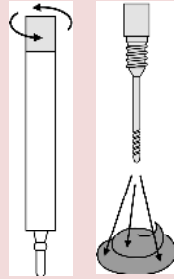

- Dévissez le tube et enfoncez le bâtonnet spiral env. 2 cm à **3 endroits différents** dans l'échantillon.

3. Introduisez le bâtonnet spiral

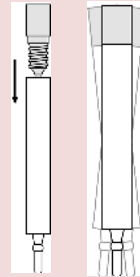


- Introduisez le bâtonnet spiral (avec l'échantillon accroché) dans le tube lequel contient le réactif

Attention: Des échantillons mélangés avec le réactif se gardent température ambiante 6 heures. A 2-8°C celles-ci se conservent ca 3 jours.

4. Pipetez la solution d'Extraction sur la cassette.

- Prenez du papier, brisez avec précaution la pointe du tube.

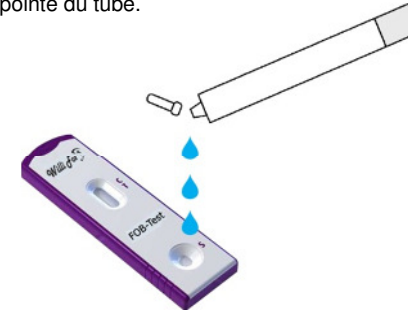

- Pipetez **3 gouttes** dans l'ouverture ronde de la cassette

5. Attendez 5 min. pour l'interprétation



- **Plus d'interprétation après 10 minutes !**

6. L'interprétation du test

Résultat positif:



Ligne de contrôle (C)
Confirme le déroulement correct

Ligne de test (T)

Deux lignes rouges apparaissent dans la fenêtre.

Attention: L'intensité de couleur de la ligne de test peut être plus faible ou plus forte que celle de la ligne de contrôle et peut varier entre rose et rouge !

Résultat négatif:



Uniquement une ligne rouge apparaît dans la région de contrôle (C):

Attention: Interprétez entre 5 à 10 minutes!

Résultat pas valable:



Aucune ligne rouge n'apparaît dans la région de contrôle (C).

Le test n'est pas valable et doit être refait!