

# Guide rapide – Test Cardiac Marker Combo

Déterminez dans:

**A. Echantillons de plasma ou de sérum**




**2 gouttes** de sérum ou plasma pour chaque  
**1 goutte** de puffeur pour chaque

**B. Sang total veineux**



**2 gouttes** sang total veineux pour chaque  
**1 goutte** de puffeur pour chaque

**C. Sang total capillaire**

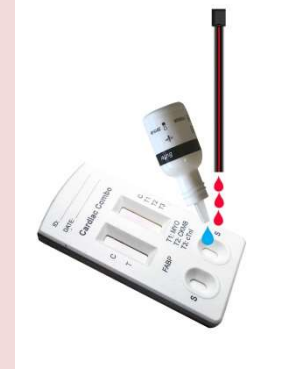

**50 µl** sang total capillaire pour chaque  
**1 goutte** de puffeur pour chaque


**2. Attendez 10 min. pour l'interprétation**



**Plus d'interprétation après 20 minutes !**

## 3. L'interprétation du test

**Résultat positif:**

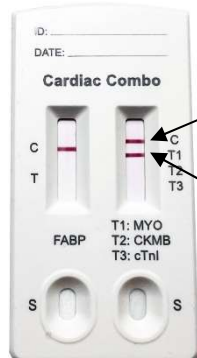


**Ligne de contrôle (C)**  
Confirme le déroulement correct

**Lignes de test (T)**

**3 à 6 lignes rouges** apparaissent dans la fenêtre.

Attention: L'intensité de couleur de la ligne de test peut être plus faible ou plus forte que celle de la ligne de contrôle et peut varier entre rose et rouge !


**Résultat négatif:**

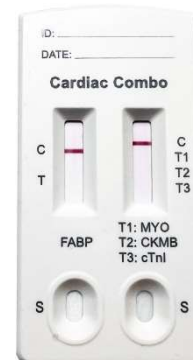

**Une seule ligne rouge** apparaît dans chacune des régions de contrôle (C)

Attention: Interprétez entre 10 à 20 minutes!

**Résultat pas valable:**

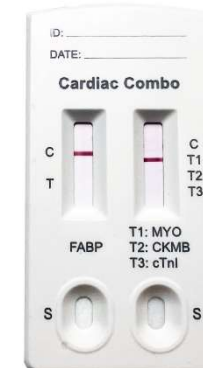

**Aucune ligne rouge** n'apparaît dans les régions de contrôle (C).

Le test n'est pas valable et doit être refait!