


Guide rapide – Test simple de dépistage de stupéfiants

1. Donnez 3 gouttes d'urine sur le testeur d'échantillon de la cassette placée horizontalement

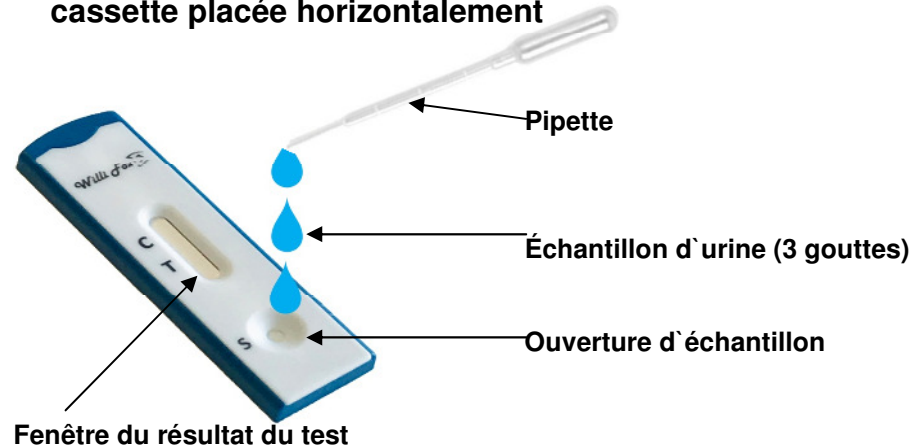


2. Attendez 3 à 5 minutes



Attention: N'attendez jamais plus de 10 minutes

3. Relevez le résultat du test

Drogues non détectables (négatif):

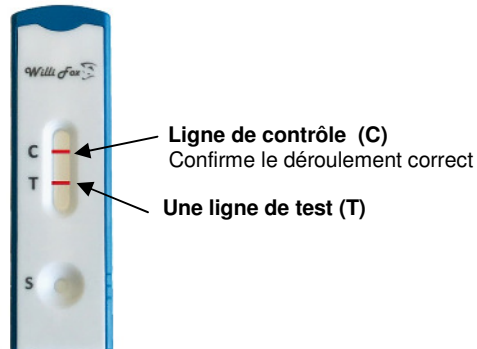

Doux lignes rouges apparaissent dans la fenêtre.

Attention: L'intensité de couleur de la ligne de test peut être plus faible ou plus forte que celle de la ligne de contrôle et peut varier entre rose et rouge !

Drogues détectables (positif):



Uniquement une ligne rouge apparaît dans la région de contrôle (C):

Attention: Même un faible changement de couleur rose de la ligne de test doit être interprété négativement, puron qu'il soit constaté dans un délai entre 3 à 5 minutes!

Résultat du test sans valeur:



Aucune ligne rouge n'apparaît dans la région de contrôle (C).

Le test n'est pas valable et doit être refait!