


Guide rapide – Test Multi-Drogues (Dépistage des 6 drogues)

1. Retirez le capuchon de protection. Immergez l'extrémité des bandelettes environ à 3/4 dans l'échantillon pendant 5 secondes.

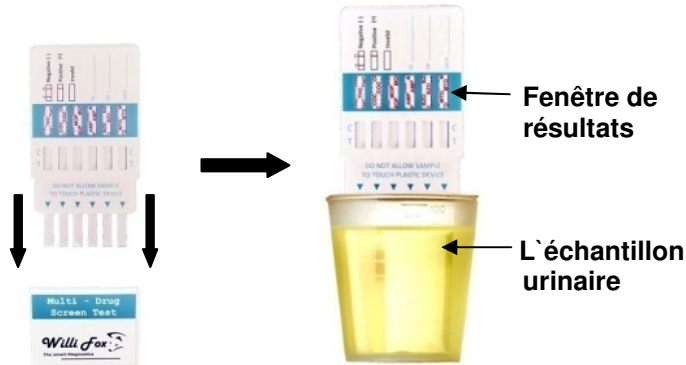

2. Remettez le capuchon et posez la cassette de test sur un support horizontal.



3. Lisez le résultat après 3 - 5 minutes.




Attention: soyez bien attentif à ce que l'urine n'entre pas en contact avec le test en dessus de la ligne « max ».

Attention: Ne lisez pas le résultat après plus de 10 minutes!

4. Interprétation du test:

Résultat négatif:

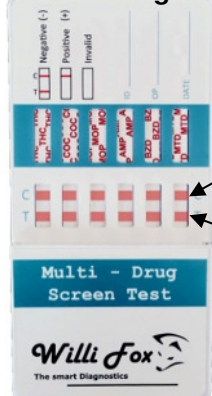


La ligne de contrôle (C)
Définit si le test est valide ou non

La ligne de test (T)

Apparition de **deux lignes colorées** dans les fenêtres de test.

ATTENTION: Même un faible changement et couleur rose dans la région de test (T) doit être interprété négativement, s'il est constaté dans un délai entre 3 à 10 minutes.


Résultat positif:

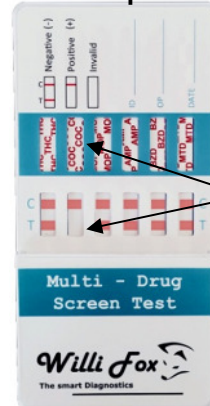

Par exemple: positif du Cocaïne

Apparition **d'une seule ligne** à la hauteur de C à une ou plusieurs fenêtres de test.

Résultat caduc:

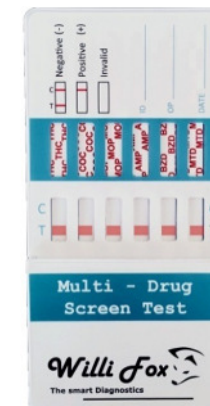

Aucune ligne rouge n'apparaît dans la région de contrôle (C).

Le test n'est pas valable et devrait être refait.