


Guide rapide - Test salivaire multidrogues

1. **Enlevez le capuchon, collectez de la salive dans la bouche jusqu'à ce que la région-test se colore en rouge.**

2. **Après environ 3 à 8 minutes, le résultat peut être relevé.**

Important : Au moins 10 minutes avant la récolte de l'échantillon, le patient ne doit pas manger, boire, fumer ou mâcher des produits de tabac !

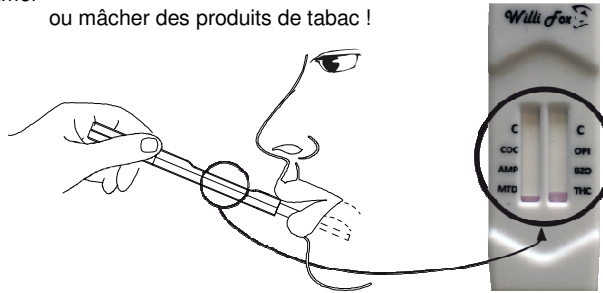


- La languette absorbante doit être placée de préférence sous la langue.
- Quand la salive récoltée est suffisante, remettez le capuchon.

Attention: N'attendez en tout cas pas plus de 20 minutes pour relever le résultat !

3. Relevez le résultat du test :

Drogues non détectables (négatif):

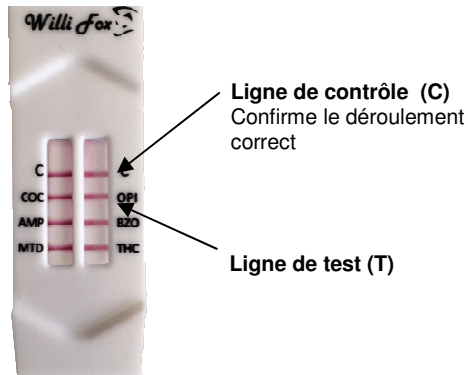


Ligne de contrôle (C)
Confirme le déroulement correct

Ligne de test (T)

Huit lignes rouges apparaissent au total dans les deux fenêtres (quatre lignes par fenêtre).

Attention: L'intensité de couleur de la ligne de test peut être plus faible ou plus forte que celle de la ligne de contrôle et peut varier entre rose et rouge !

Drogues détectables (positif):

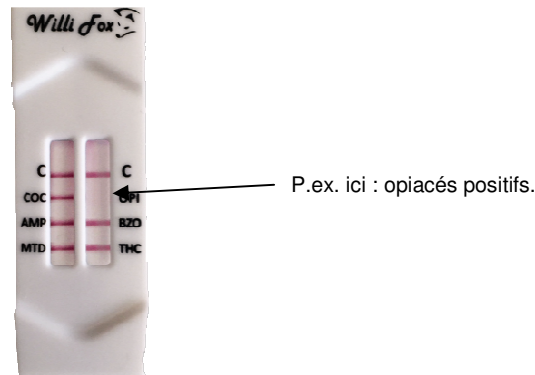


P.ex. ici : opiacés positifs.

Une ou plusieurs lignes rouges n'apparaissent pas dans les fenêtres de test.

Attention: Même un faible changement de couleur rose de la ligne de test doit être interprété négativement, pourvu qu'il soit constaté dans un délai entre 3 et 8 minutes!

Résultat du test sans valeur:

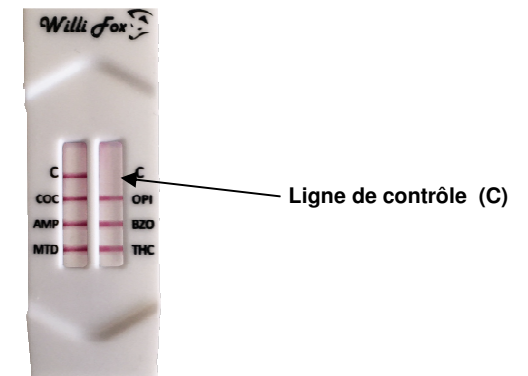

Ligne de contrôle (C)

Aucune ligne rouge n'apparaît dans la région de contrôle (C) d'une ou des deux fenêtres de test.

Le test n'est pas valable et doit être refait!