
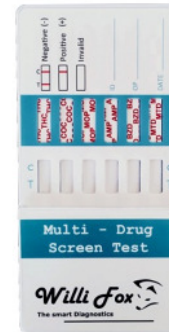


Kurzanleitung – Multidrogentest (6 Drogennachweise)

1. Schutzkappe abziehen und die Teststreifen der Kassette mindestens zu 3/4 für ca. 5 Sekunden in die Urinprobe eintauchen.
2. Kappe wieder über die Kassette stülpen und waagrecht hinlegen
3. 3 - 5 Minuten warten.

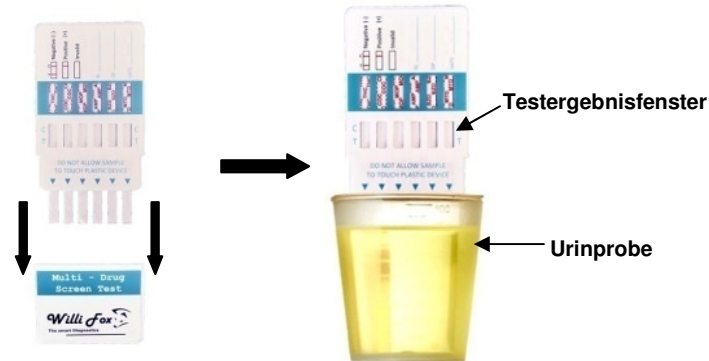


Achtung: Tauchen Sie die Teststreifen zu tief ein (bis über den Plastik der Kassette), machen Sie den Test unbrauchbar!

Achtung: Auf keinen Fall länger als 10 Minuten warten mit dem Ablesen!

4. Testergebnisse ablesen:


Keine nachweisbaren Drogen (negativ):

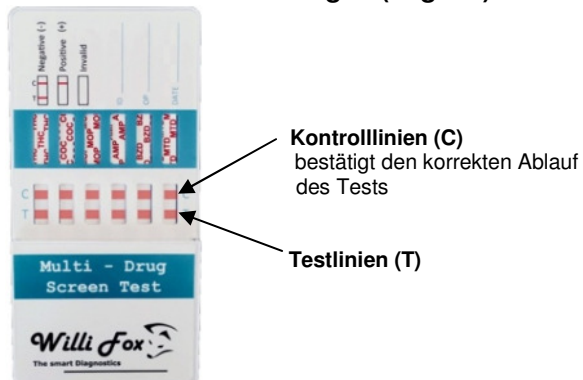

Zwei rote Linien erscheinen in den 6 Sichtfenstern.

Achtung: Die Farbintensität der Testlinie kann schwächer oder stärker sein als die der Kontrolllinie und zwischen rosa und rot variieren.


Nachweisbare Drogen (positiv):

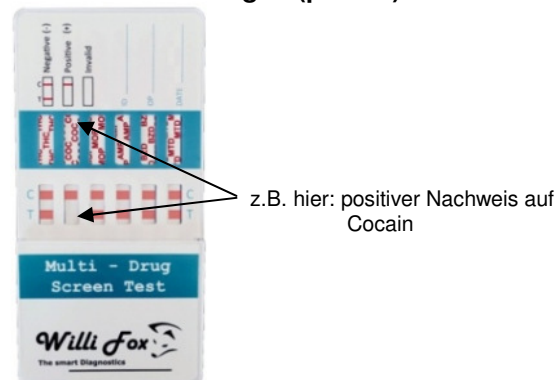

Nur eine rote Linie (in der Kontrollregion C) erscheint in einem oder mehreren Testfeldern.

Achtung: Selbst eine nur leichte rosa Verfärbung der Testlinie muss, wenn sie innerhalb der Auswertungszeit (3 bis 10 Minuten) abgelesen wurde, als negativ interpretiert werden!

Ungültiges Testergebnis:

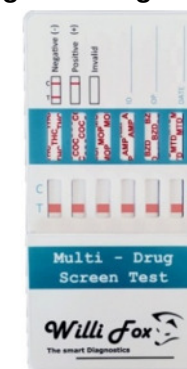

Keine rote Linie erscheint in der Kontrollregion in einem der Testfelder(C).

Der Test ist ungültig und sollte wiederholt werden!