


# Kurzanleitung – Multidrogentest (10 Drogennachweise)

1. Schutzkappe abziehen und die Teststreifen der Kassette mindestens zu 3/4 für ca. 5 Sekunden in die Urinprobe eintauchen.

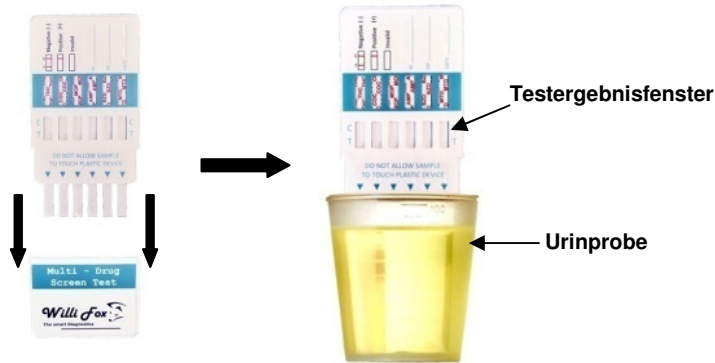

2. Kassette mit der Kappe verschliessen und waagrecht hinlegen



3. 3 - 5 Minuten warten.




**Achtung:** Tauchen Sie die Teststreifen zu tief ein (bis über den Plastik der Kassette), machen Sie den Test unbrauchbar!

**Achtung:** Auf keinen Fall länger als 10 Minuten warten mit dem Ablesen!

## 4. Testergebnisse ablesen auf Vorder- und Rückseite:


**Keine nachweisbaren Drogen (negativ):**

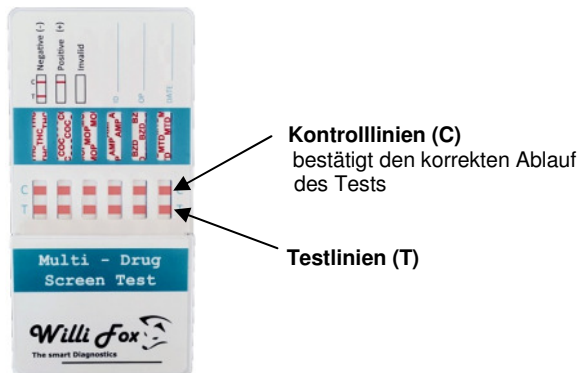

**Zwei rote Linien** erscheinen in den 10 Sichtfenstern. **Vorder- und Rückseite beachten!**

Achtung: Die Farbintensität der Testlinie kann schwächer oder stärker sein als die der Kontrolllinie und zwischen rosa und rot variieren.


**Nachweisbare Drogen (positiv):**

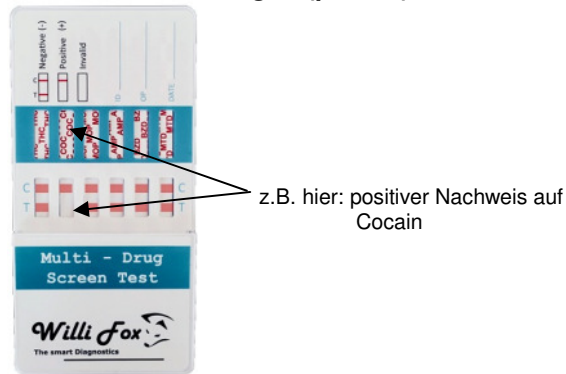

**Nur eine rote Linie** (in der Kontrollregion C) erscheint in einem oder mehreren Testfeldern.

Achtung: Selbst eine nur leichte rosa Verfärbung der Testlinie muss, wenn sie innerhalb der Auswertungszeit (3 bis 10 Minuten) abgelesen wurde, als negativ interpretiert werden!

**Ungültiges Testergebnis:**

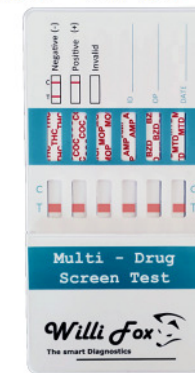

**Keine rote Linie** erscheint in der Kontrollregion in einem der Testfelder(C).

Der Test ist ungültig und sollte wiederholt werden!