

Kurzanleitung – EtG-Test

1. Nehmen Sie die Schutzkappe weg und tauchen Sie die saugfähige Zunge bis zu den Wellenlinien für 10 - 15 Sekunden in die Urinprobe.




2. Kassette auf eine ebene Unterlage legen und nach 5 - 8 Minuten ablesen.



Achtung: Auf keinen Fall länger als 10 Minuten mit dem Ablesen warten!

3. Testergebnis ablesen

Keine nachweisbares EtG (negativ):

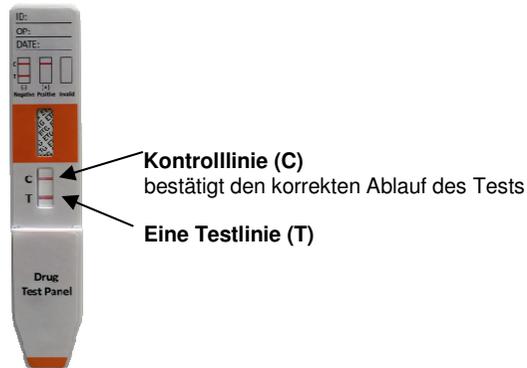

Zwei rote Linien erscheinen im Sichtfenster

Achtung: Die Farbintensität der Testlinie kann schwächer oder stärker sein als die der Kontrolllinie und zwischen rosa und rot variieren.

Nachweisbares EtG (positiv):



Nur eine rote Linie erscheint in der Kontrollregion (C):

Achtung: Selbst eine nur leichte rosa Verfärbung der Testlinie muss, wenn sie innerhalb der Auswertungszeit (5 bis 10 Minuten) abgelesen wurde, als negativ interpretiert werden!

Ungültiges Testergebnis:



Keine rote Linie erscheint in der Kontrollregion (C).

Der Test ist ungültig und sollte wiederholt werden!