


Guide rapide – Ethylotest

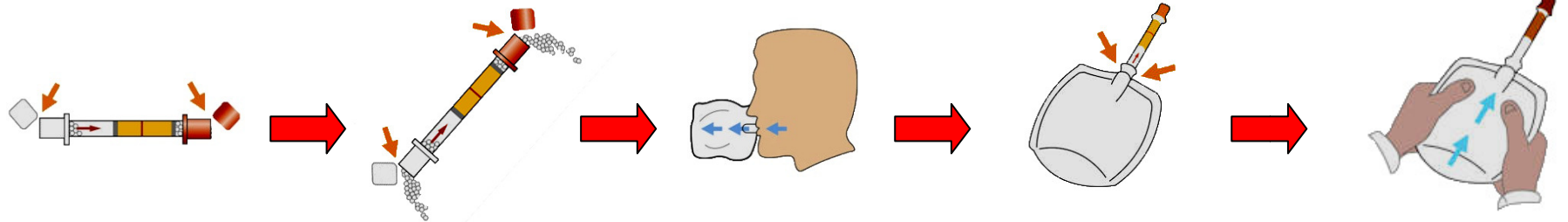

1. Briser chaque extrémité en plastique.

2. Vider les cristaux blancs inoffensifs par les deux extrémités.

3. Souffler dans le sachet en plastique (ballon) en **une seule** expiration.

4. Insérer l'extrémité **blanche** du tube fermement dans l'embout à clapet situé dans l'orifice du ballon.

5. Presser le ballon lentement et régulièrement avec les deux mains afin de faire passer l'air dans le ballon à travers le tube pendant environ **20 secondes**.

6. Lire le résultat après 2 minutes

Résultat négatif:



La couleur n'a pas changé au vert.

Pas de présence d'alcool ou la concentration est au-dessous de 0.2‰.

Le taux d'alcool présent est inférieur au taux limite de 0.5‰:



Ligne rouge

La coloration verte est clairement au-dessous de la ligne rouge.

Le taux d'alcool présent est supérieur au taux limite de 0.5‰:



Ligne rouge

La coloration verte est à la limite de la ligne rouge ou au-dessus de la ligne rouge.