


Guide rapide – Test rapide EtG

1. Enlevez le capuchon de protection et plongez la bandelette du test pendant 10 à 15 secondes dans l'échantillon d'urine.

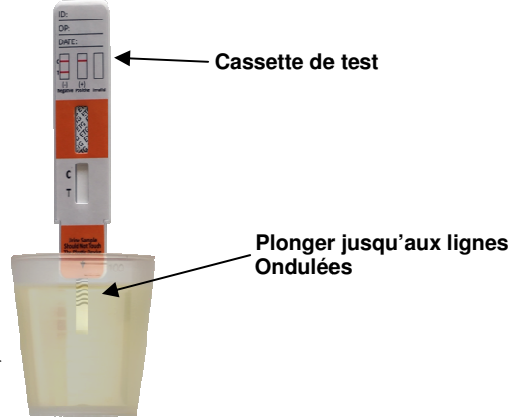


2. Posez le test sur une surface plane relevez le résultat après 5 à 8 minutes



Attention: N'attendez jamais plus de 10 minutes

3. Relevez le résultat du test

EtG non détectables (négatif):

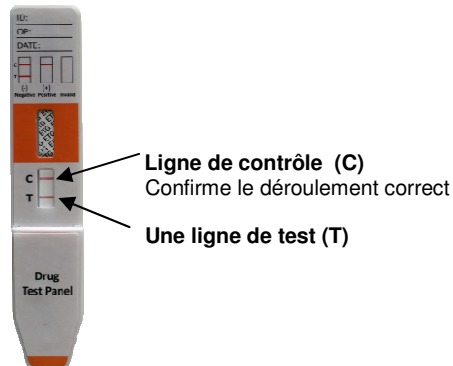

Doux lignes rouges apparaissent dans la fenêtre.

Attention: L'intensité de couleur de la ligne de test peut être plus faible ou plus forte que celle de la ligne de contrôle et peut varier entre rose et rouge !

EtG détectables (positif):



Uniquement une ligne rouge apparaît dans la région de contrôle (C):

Attention: Même un faible changement de couleur rose de la ligne de test doit être interprété négativement, puron qu'il soit constaté dans un délai entre 5 à 8 minutes!

Résultat du test sans valeur:



Aucune ligne rouge n'apparaît dans la région de contrôle (C).

Le test n'est pas valable et doit être refait!